


Kamera in Tobii Communicator nutzen

Tobii Communicator bietet die Möglichkeit mit einer USB Webcam Bilder zu machen.

In Tobii Dynamox Communicator das Camera Seitenset öffnen (vorgefertigte Seitensets). Das Bild der aktuell eingestellten Webcam erscheint und mit dem Feld, auf dem der weiße Fotoapparat angezeigt ist, kann man Fotos machen. Die Fotos werden dann unten angezeigt und können mit dem Papierkorb Bild wieder gelöscht werden.

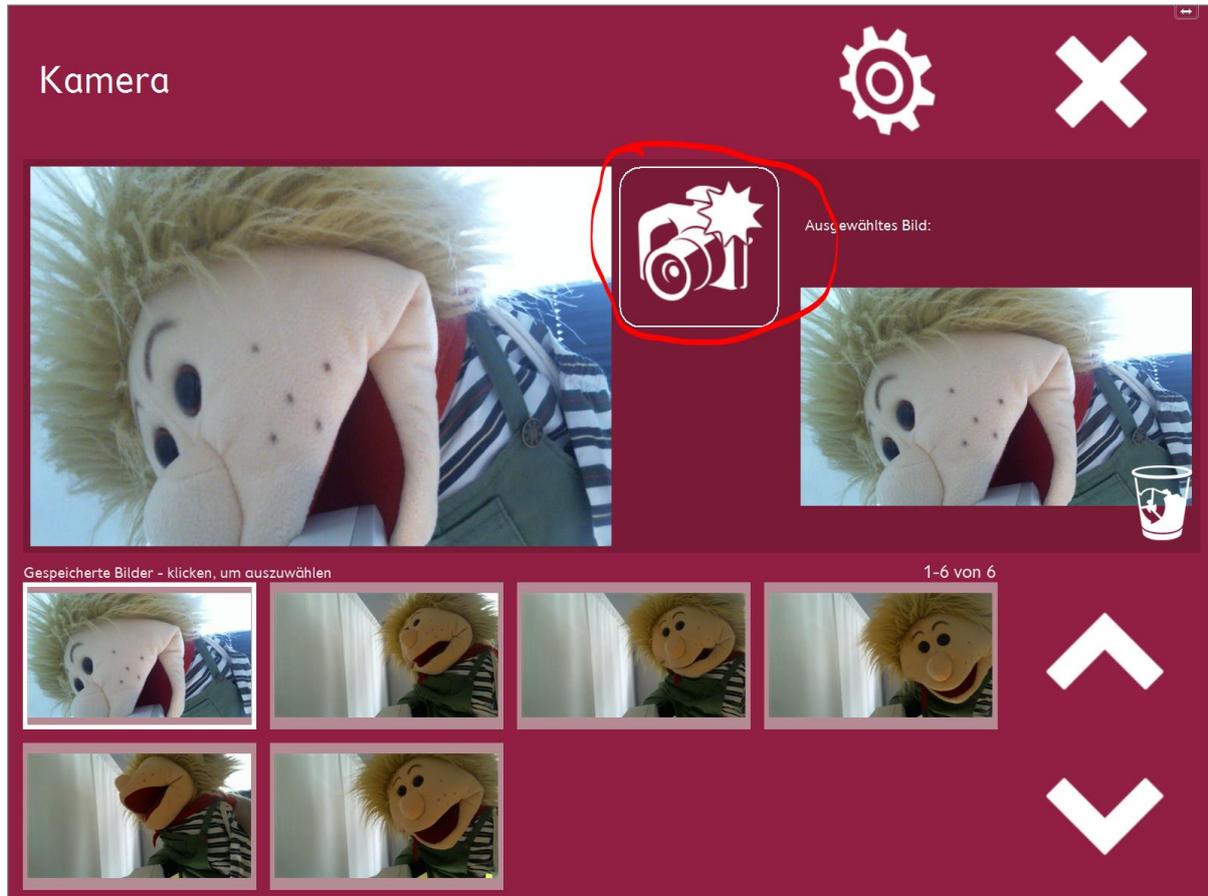

Es besteht die Möglichkeit, mehrere USB Webcams in Tobii Communicator zu nutzen. Hat das Gerät zum Beispiel eine fest eingebaute Kamera, die nicht in einer guten Position ausgerichtet ist, um Fotos zu machen, kann man eine zusätzlichen USB Webcam anschließen und installieren. Diese Kamera kann dann mit entsprechenden Halterungen und Stativen individuell ausgerichtet werden. Der Anwender kann selber die aktuelle Kamera umschalten. Wichtig: Der Kauf, die Installation und der Betrieb von zusätzlichen USB Webcams erfolgt in Ihrer eigenen Verantwortung.

Vorgehen:

1. USB Webcam kaufen, die zum Betriebssystem und der Hardware passt. Es macht Sinn eine USB Webcam mit Autofokus zu kaufen, da dann die Schärfe automatisch eingestellt wird.
2. USB Webcam nach Anleitung des Herstellers installieren und montieren.
3. Tobii Communicator starten
4. Seitenset Camera öffnen
5. Oben rechts auf das Rad klicken
6. In der Liste die neue Kamera wählen (maximal 4 Webcams)
7. Zurück zur vorherigen Seite gehen

